




Inami

シノプチスコープ




Certified Management System
DIN EN ISO 9001: 2000
JIS Q 9001: 2000
EN ISO 13485: 2000
ISO 13485: 2003

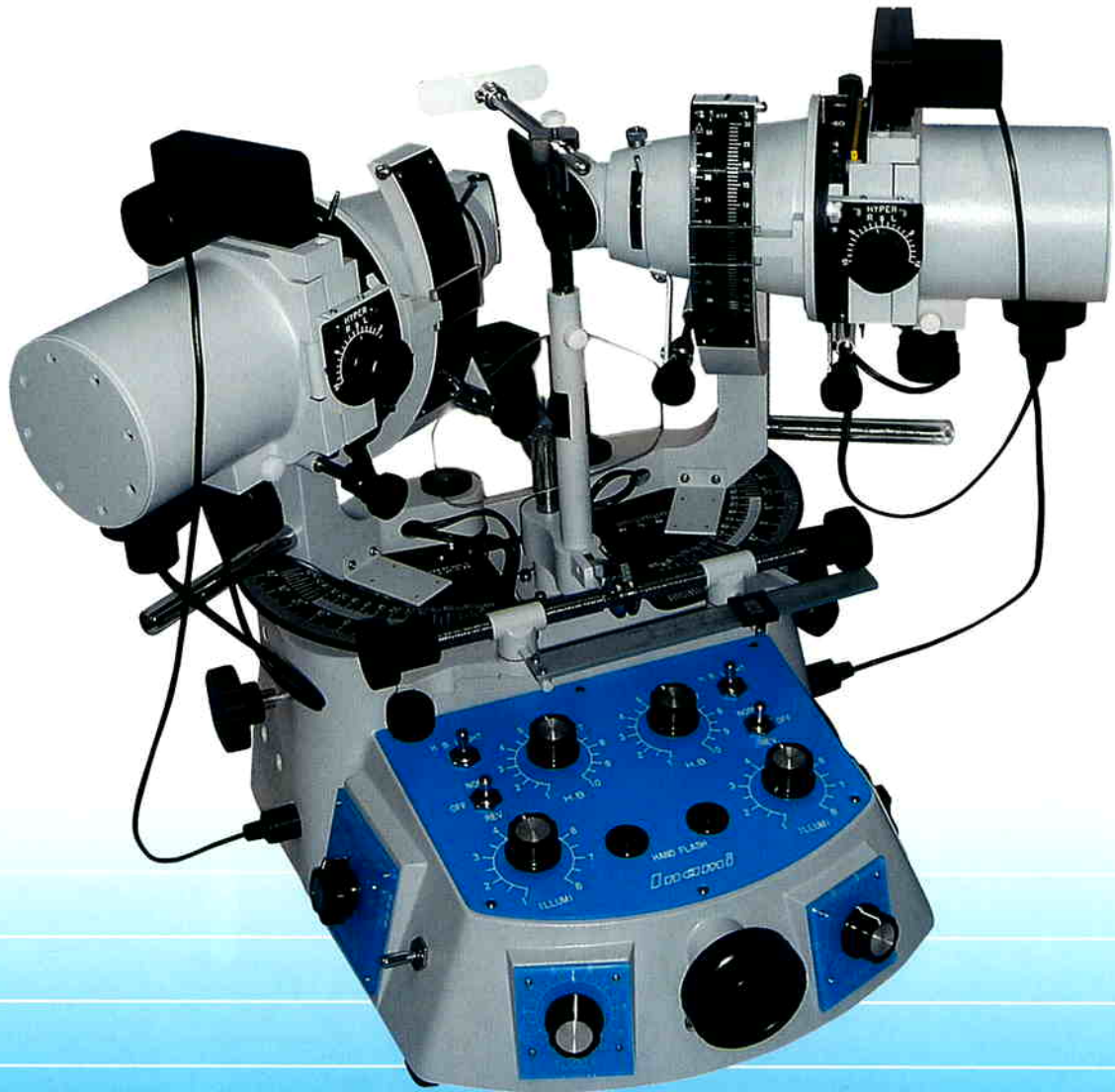

L-2510 SERIES

両眼視機能（斜視・弱視）等の診断及び治療を行なう目的で設計された同時視、融像視、立体視の三要素に

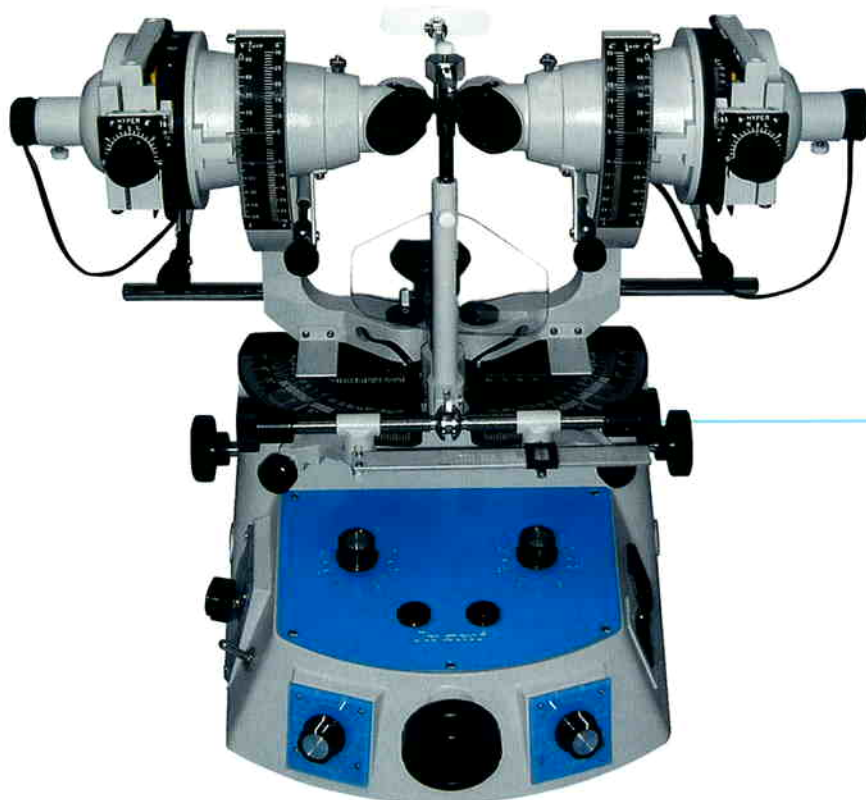

L-2510B
シノプチスコープ

L-2510HB
ハイデンガーブラシ装置付
シノプチスコープ

Function and feature



付属の接眼部ハーフミラーを使用することにより診断・治療中、検査者が被検者眼の角膜と、そこに投影されるスライドの図形を同時に観察できます。

自動点滅は側面の選択スイッチにより6種類の点滅動作を選択することができます。




- 自動点滅装置の点滅速度は正面の調整つまみにより1分間に30回～150回まで点滅速度の調整が可能です。
- 操作パネルの押釦スイッチにて手動点滅操作が行えます。



- 自動点滅動作
- 左側一方のみフリッカー
 - 右側一方のみフリッカー
 - 左側一方フリッカー
他方は連続点灯
 - 右側一方フリッカー
他方は連続点灯
 - 左右同時フリッカー
 - 左右交互フリッカー

L-2510B / L-2510HB

基づいた各種の検査・矯正ができます。

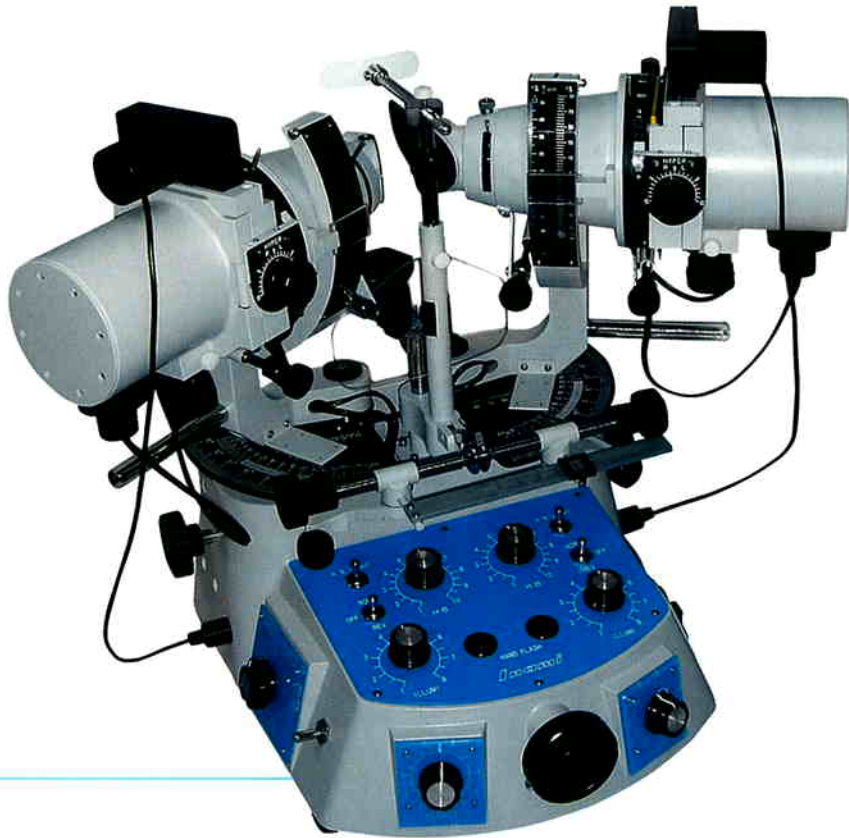

ハイデンガーブラシ機能(L-2510HB)



無段階調整絞り装置


視野を調整するための無段階調整絞り装置が備え付けられています。



ハイデンガーブラシ装置

ハイデンガーブラシ装置は着脱可能です。
ハイデンガーブラシ装置は1分間に50回転～150回転までの回転速度調整が可能です。

機能と特徴

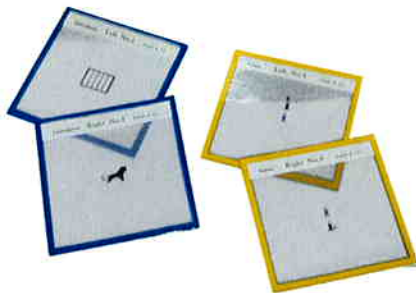


- 診断・治療用のスライドには各種の図形に美しい彩色をほどこしたカラーズライド17組及び残像検査用スライド1組が付属されています。


診断・治療用スライド

| | | | |
|---------|----------|----------|----------|
| 同時視用 | 5組 (各2枚) | 融像視用 | 5組 (各2枚) |
| 立体視用 | 5組 (各2枚) | 残像検査用 | 1組 (2枚) |
| カッパ角測定用 | 1組 (2枚) | 他覚的回旋偏位用 | 1組 (2枚) |


- 鏡頭の仰角及び俯角の回転角度は従来機 (L-2510) の20° から30° へ変更され、回転範囲が拡大されています。
- スライドの回旋角度は従来機 (L-2510) の15° から20° へ変更され、回旋範囲が拡大されています。

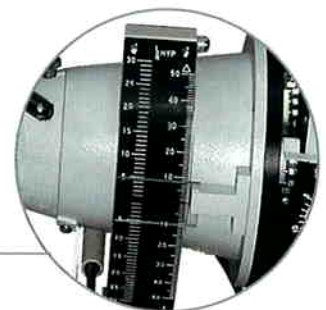

L-2510 SERIES

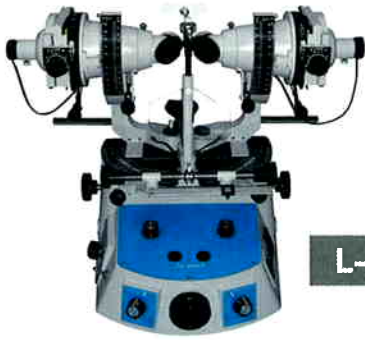

L-2510B

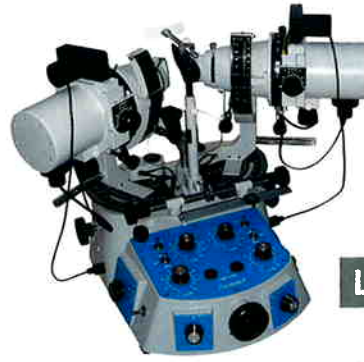

L-2510HB

■ 仕様

| 型 式 | L-2510B | L-2510HB |
|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| 瞳 孔 距 離 調 整 幅 | 45~80mm | |
| 額 受 け 位 置 調 整 | 上下移動量 60mm 前後移動量 45mm | |
| 鏡 頭 回 転 範 圍 | 仰 角 回 転 角 度 | 30° (プリズムディオプター換算値 50△) |
| | 俯 角 回 転 角 度 | 30° (プリズムディオプター換算値 50△) |
| | 輻 湊 扁 位 角 度 | 50° (プリズムディオプター換算値 100△) |
| | 開 散 角 度 | 40° (プリズムディオプター換算値 80△) |
| ス ラ イ ド 回 旋 角 度 | 上下各々20° | |
| ス ラ イ ド | 同時視用 5組(各2枚) | 残像検査用 1組(2枚) |
| | 融像視用 5組(各2枚) | カツパ角測定用 1組(2枚) |
| | 立体視用 5組(各2枚) | 他覚的回旋偏位用 1組(2枚) |
| 自 動 点 滅 装 置 | 速度調整範囲 30~150回/min | |
| 手 動 点 滅 装 置 | 押しボタンスイッチ | |
| 無段階視野絞り装置 | — | 視野(視覚)調整 φ10~50mm |
| H . B . 装 置 | — | 回転速度調整範囲 50~100回転/min |
| 使 用 電 球 | スライド用白熱電球 8V 0.7A | スライド白熱電球 8V0.7A |
| | | H.B.用電球 8V 3A |
| 使 用 電 源 | AC100V 50/60Hz | |
| 消 費 電 力 | 26VA | 64VA |
| 寸 法 (m m) | 505(W)×320(D)×392(H) | 552(W)×320(D)×392(H) |
| 重 量 | 15kg(本体) | 18kg(本体) |

許可番号 11BZ0207

※製品の仕様・デザインは改良のため予告なく変更する場合があります。



Certified Management System
DIN EN ISO 9001:2000
JIS Q 9001:2000
EN ISO 13485:2000
ISO 13485:2003

本社及び美大木研究所にて
品質システムの認証取得

本 社：〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目24番2号 TEL.03-3814-1735 FAX.03-3814-3334
Website: <http://www.inami.co.jp> E-mail: corpinfo@inami.co.jp
名古屋：〒465-0094 名古屋市名東区亀の井3丁目208番地 TEL.052-704-2173 FAX.052-704-2174
大 阪：〒663-8143 兵庫県西宮市枝川町17番8号204 TEL.0798-41-7232 FAX.0798-41-6733
九 州：〒816-0905 福岡県大野城市川久保1丁目17番17号 TEL.092-504-1734 FAX.092-504-5355